

メーカー希望小売価格 セット価格(本体 / 付属品)-----118,600 円(税込 124,530 円)

仕 様


定格電源	(商用電源) AC 100V (50/60Hz) (内部電源) 直流3.6V (単三NiHM充電電池 6本)	サイズ	200mm(W)×190mm(H)×78mm(D)
定格消費電力	(商用電源) 35VA (内部電源) 8VA	重 量	660g 充電電池を除く
保護の形式と程度	クラスⅡ 機器及び内部電源機器・BF形		

機 能

加温/放熱間隔設定 :Aモード(加温周期20秒)、Bモード(加温周期30秒)
温度レベル設定 :1～4(1が最も低温で、1段階毎に3℃上昇)
出力極数 :4
治療タイマー :1、3、5、10、15、20、25、30分
充電機能時間 :最大4時間にて、単三NiHM充電電池(エネルーブ)を充電
音量調節機能 :音量をOFFから最大まで8段階で調節可能



本 体 標準付属品／別売品※1

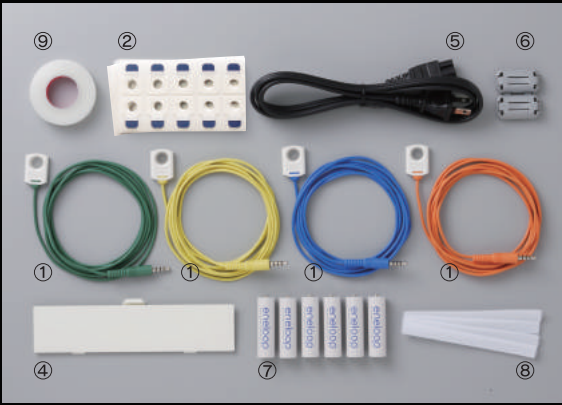

名 称	標準付属品	別売品※1
①熱導子CL-01	4本	1本/4本
②専用テープ ST01	20枚	50枚/100枚
③専用バック	1個	1個
④専用電池ボタン	1個	1個
⑤専用電源コード	1本	1本
⑥フェライトコア	1個	1個
⑦エネルーブ単三	6本	12本
⑧マジックテープ	100mm×4本	※1
⑨3Mサージカルテープ	1本	※1

※1：株式会社全医療器にご確認下さい。
注：品質向上のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

本製品はEMC規格 IEC60601-1-2:2001に適合しています。

EMC規格とは、Electromagnetic compatibilityの略語で、“電磁的両立性”と訳される。
「ある一定以上の電磁妨害を与えず。」かつ、「ある一定以上の電磁妨害を受けても影響されないこと。」
の両方の基準をクリアした機器が、EMC規格に認証を得ることができます。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせ、ご用命は・・・

ご不明な点や商品に関するお問い合わせはこちらへ

株式会社 全医療器（受付窓口） 製造販売元

※受付時間（祝日を除く月～金）8:30～17:00。
都合により受付時間を変更させていただく場合がございます。

0120-151-903

zeniryoki

検索

携帯電話用
QRコード▶



管理医療機器（特定保守管理医療機器）
乾式ホットパック装置
医療機器認証番号 :223AGBZX00130000

Shouki しょうき
電気温灸器 Shouki E09-04



「安全で、見えるお灸治療してみませんか？」

火を使わないので、安全・清潔です。

穏やかなお灸のリズムで効果的な温熱刺激です。

発熱部が透明ガラスヒーターなので、清潔感があり、下した灸点が見えます。

小型・軽量化、充電機能付きで持ち運びも便利です。

つばに貼れて、取れにくい構造です。 (※肌にやさしい専用両面シールST01使用時)

肌へ触れる部分は、かぶれにくい素材を使用(透明セラミックスと樹脂)しております。



株式会社 全医療器

人にやさしい素材で、安心、安全に 連続のお灸感覚を再現した治療器

2種類の効率的な温熱治療をサポート。

加温モードA:約20秒間隔で加温を行う短時間加温治療となり、知熱灸を意識した治療となります。

加温レベル	1	2	3	4
ピーク温度℃	43.5	46.5	49.5	52.5
画面表示	A1	A2	A3	A4


最高飽和温度(65mm²×t0.5mmの銅板に設置した場合)は、42℃です。

加温モードB:約30秒間隔で加温を行う温灸加温治療となり、温熱灸を意識した治療となります。


加温レベル	1	2	3	4
ピーク温度℃	42.0	45.0	48.0	51.0
画面表示	B1	B2	B3	B4

最高飽和温度(65mm²×t0.5mmの銅板に設置した場合)は、40℃です。

モードAでのピーク温度測定結果(解放空間)

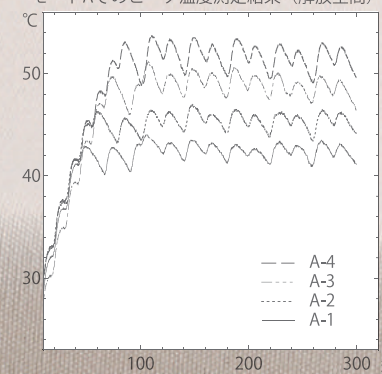

モードBでのピーク温度測定結果(解放空間)

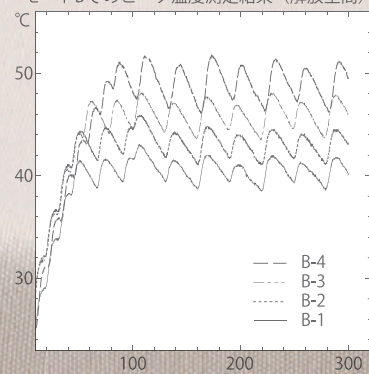


各モードには、4段階の温度設定が可能です。治療する箇所や、肌の状態にて全8種類の温度設定が選択でき、細やかな治療が期待されます。

あつかいやすさと温熱効果にこだわりぬいた構造

熱導子(C L - 1)

- 上部のガラスヒーターが開口されているため、不必要な熱を放熱し、温度緩急をつけるのに有効です。
- 発熱部分は全て、透明な素材を使用しておりますので、治療箇所の状況が見え、よりつぼを押さえることに適しております。
- 純度の高いガラスを用いヒーターとすることで、強度を高めております。

厚さ6mmの平面構造で、付属テープにて貼り付けやすい構造を実現しました。

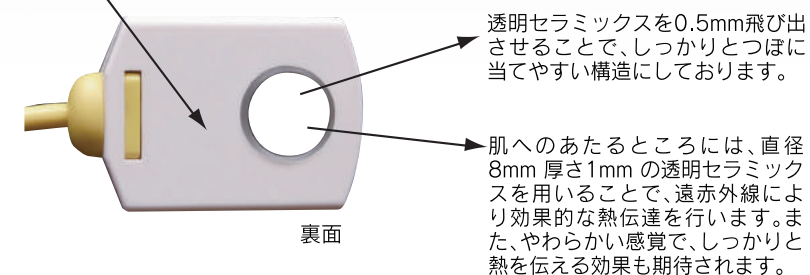

透明セラミックスを0.5mm飛び出させることで、しっかりとつぼに当てやすい構造にしております。


肌へのあたるところには、直径8mm 厚さ1mmの透明セラミックスを用いることで、遠赤外線により効果的な熱伝達を行います。また、やわらかい感覚で、しっかりと熱を伝える効果も期待されます。



張り付けも、付属品の専用両面テープを使うことで簡単に出来ます。

直観的な操作性

L C D画面により、機器のリアルタイムな状況を確認できます。また、熱導子自己診断プログラム、エラー表示機能、診断モード等安全性を高める機能を搭載しております。

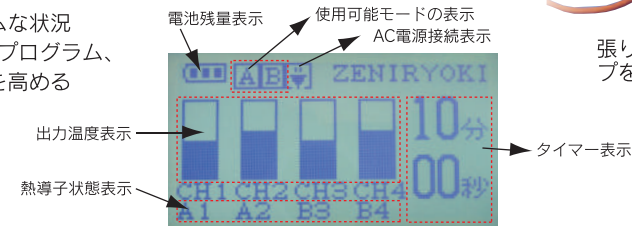

Shoukiは、伝統のお灸をより安全に治療を行うために生まれた、電気温灸器です。これまでの電気温灸器で、「お灸」に近い感覚で最も利用されている加温間隔を採用し、加温効果を高めることと、安全に治療ができる素材を使用することで、効果的な治療をサポートするプロフェッショナルモデルです。

【火を使わないので、安全・清潔です。】

火を使わないので、シーツの焦げや、煙による治療室の汚れや、空調設備をいためることがありません。

【穏やかなお灸のリズムで効果的な温熱刺激です。】

Shoukiでは、貼るだけで、知熱灸と温熱灸の連続灸を意識した加温間隔と、4段階の温度調節で、様々な治療をサポートします。

【発熱部が透明ガラスヒーターなので、清潔感があり、下した灸点が見えます。】

発熱部には、基材が石英ガラス(SiO₂非晶質、純度99.99%)のヒーターを使用することで透明で、低い消費電力、遠赤外線(8~10μm)を効率で輻射します。

ガラスでできておりますので、下した灸点を逃さず取り付けでき、治療中の状態観察もできますので、安心して治療が行えます。

【小型・軽量化、充電機能付きで持ち運びも便利です。】

本体の重さ660gで、安心して持ち運びができます。

また、単三×6本のニッケル水素充電電池(又はアルカリ乾電池)で約3時間(アルカリ乾電池の場合、約1時間)の治療ができますので、往診時やAC電源が使えない場合でも治療ができます。

充電機能が付いておりますので、夜間や治療を行わない間に約4時間で充電を行い経済的です。(充電は、スリープモードで行います。)

【専用両面シールで、つぼに貼れて、取れにくい構造です。】

熱導子に専用両面シールを取り付けることで、治療ポイントに置いて、軽く押すだけで取り付けることができますので、安心して的確な治療をサポートします。

【肌へ触れる部分は、かぶれにくい素材を使用(透明セラミックスと樹脂)しております。】

肌へ触れる発熱部は、熱伝導率が非常に高い特殊な透明セラミックスを使用しております。また、紫外～赤外領域まで高い透過性(理論透過率84%)を有しておりますので、ガラスヒーターの遠赤外線の輻射とともに効果的な熱伝導が行われます。

(透明セラミックスは、ミクロン単位の単結晶粒子が緻密に集合した構造となっており、粒界に不純物は存在しません。)