


# Kii caldo

臭いと煙にバイバイ👋

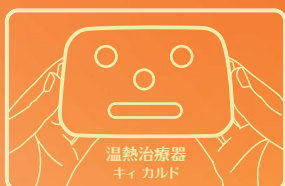

ZEN

販売元



株式会社 全医療器

TEL:092-565-1903 (代)

<https://www.zeniryoki.co.jp/>

福岡県福岡市南区鶴田3丁目16番地7号


キイ カルド  
“Kii caldo”で温活のすすめ  
「血行を良くする」「胃腸の働きを活発にする」

温熱Kii caldoは、Kii caldo(発熱剤)と水の化学反応で高温を約20分以上持続してお腹や腰を効率よく温める「治療院様専売品」の温熱治療器です。

温熱Kii caldo

<治療院様専売品>

セット品

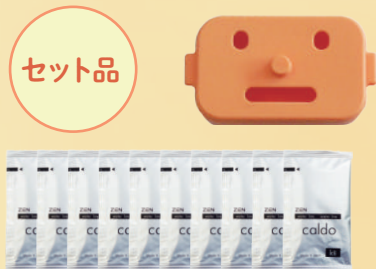

Kii 温box 1個 + Kii caldo 10袋

一般医療機器 家庭用温熱パック (届出番号 40B2X00011000001)

単品




Kii 温box 1個

Kii 温シート 3枚  
[厚さ1mm・2mm・3mmセット]

Kii caldo 50袋

キイ カルド  
Kii caldo発熱剤のしくみ

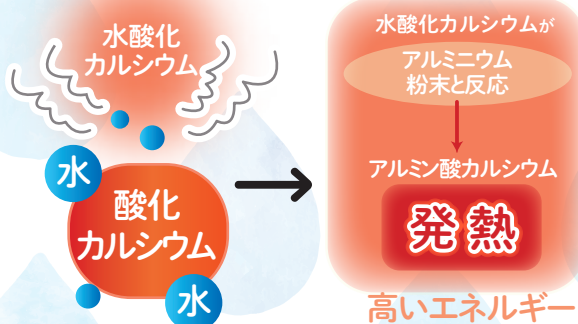

Kii caldoは、酸化カルシウムとアルミ粉末が主成分です。その中に微量の発熱をコントロールする反応助剤を配合しています。安定した熱量で連続的に化学反応することで、加熱ムラを抑えています。

キイ おん  
最適な温度を保つKii 温box

熱の伝わり方や、心地よさを研究して生まれた「Kii 温box」は、バランスよく蒸気を排出するフォルム設計により、「Kii caldo」の化学反応によって生じた熱を、効率的に伝えていきます。





最高温度約


※1  
65℃

※1:本測定にはKii温シート(1mm)を使用し、厚さ0.3mmの銅板とKii温シート(1mm)の間の温度を測っています。

高温で20分以上  
温め続けるよ!

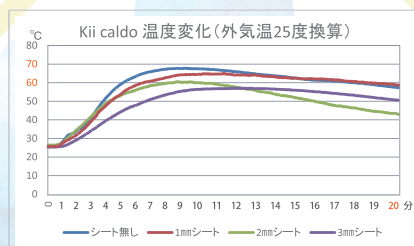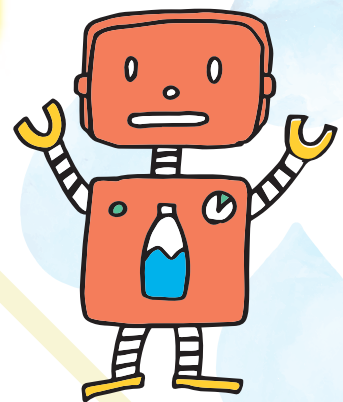

お腹  
あっためよう！

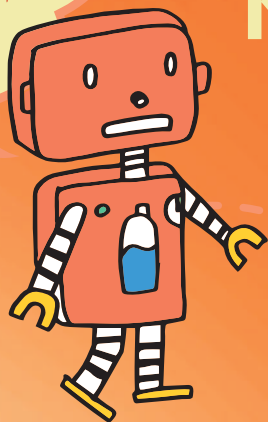

# Kii caldo 温活ガイド

Kii caldoの使用方法について、「準備」から「発熱」「終了」まで、  
簡単4 STEPの流れを詳しく説明します！

START

## 事前の準備



Kii 温boxに  
Kii caldoを入れます STEP 1



内側の目盛線まで  
水を注ぎます STEP 2



すぐにフタをします STEP 3



発熱が始まります STEP 4



平らなところに  
置いてください

GOAL



【温度調節】  
防水シートの上に「Kii 温シート」や「タオル」を置いて調節します



※地域の分別規定に従ってください



# Kii caldoは 治療院さま専売品!!

だから  
WEBやカタログには  
「価格」を表示していません!

治療院さまを  
応援しています!

アロマを数滴垂らすだけで  
いい香りが部屋中に広まる



## 100%

精油の  
アロマオイルを  
使用してください。

⚠ 界面活性剤などが混入しているアロマオイルは  
泡が出てきて火傷する危険性があります。

使用後のKii caldoを首・肩  
そけい部に当てて温める



⚠ 高温の時は、タオルなどで巻いてください。



Kii caldo使用動画



Kii caldo7つのルール  
(ご使用前に必ずご覧ください)



メール問合せフォーム

価格・ご注文方法・商品に関するお問合せはコチラ **0120-151-903** フリーダイヤル

## よくある質問

### Kii caldoに関する「よくある質問」を集めました!

Q 発熱剤の成分は何ですか?

A 主成分は酸化カルシウム・アルミ粉末・食品添加剤です。

Q 海外へ持ち出すことが出来ますか?

A 航空機での持ち出しは出来ません。

Q 発熱剤は、どれくらい保存できますか?

A 製造後5年です。有効期限は包装の裏面に記載してます。

Q やけどをする危険はありますか?

A 発熱剤は高温になります。火傷には十分に注意してください。使用方法を守り、ご使用中は患者様から目を離さないようにしてください。

Q 水は何を使用してもよいですか?

A 水道から出る水をご使用ください。

Q 水素ガスが出ると聞きましたが、安全でしょうか?

A 火を近づけると燃焼しますので、火気厳禁です。  
水素自体は人体に無害ですが、気になる場合は  
換気の良いところでご使用ください。


Q 使用後はどのように処分したらいいですか?

A 使用済みの発熱剤は十分に温度が下がっていることを  
確認したうえで、家庭用のゴミとして地域の分別規  
定に従って処分してください。使い捨てカイロと同じ  
分別になります。



安全に  
使用するための  
注意事項

- ・火気厳禁(使用中は火気を近づけないでください)
- ・不安定な場所へは使用しないでください。
- ・6.6平方メートル(4畳程度)、天井の高さ2メートル以下での場所では使用不可。
- ・急性疾患特に炎症性のもの、強度の身体虚弱、外傷、細菌性疾患、脳出血直後、急性脊髄炎、てんかん、感染症、高血圧、結核性の病気、心臓疾患及び医師から入浴や運動を禁止されている方へのご使用はおやめください。
- ・目、粘膜部、感覚が鈍い方へのご使用は、おやめください。

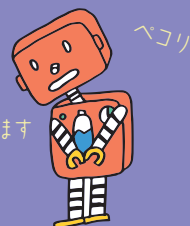

よろしく  
お願いします