

1 内側の線まで水を注ぐ

二本線の
下線まで



水道水を使う

Kii 温box内側(2本線)の
下線まで水道水を注ぐ。

2 正しい順番を守る

※順番を間違えると水の分量が
変わり危険です。

①発熱剤を入れる

Kii 温boxにKii caldo (発熱剤)
を入れる。

②水を入れる

Kii caldo(発熱剤)の上に水を注ぐ。

内側2本線の下線
または水100cc

3 防水シートの上 に置く

防水シートの上に
Kii 温boxを置く。

※寝返りなどで、万が一水が
こぼれた場合は、防水シート
ごと持ち上げ本体を体から離し
火傷しないようにしてください。




4 斜めにしない

平らな部分へ置く。



中の水が、こぼれないように注意する。

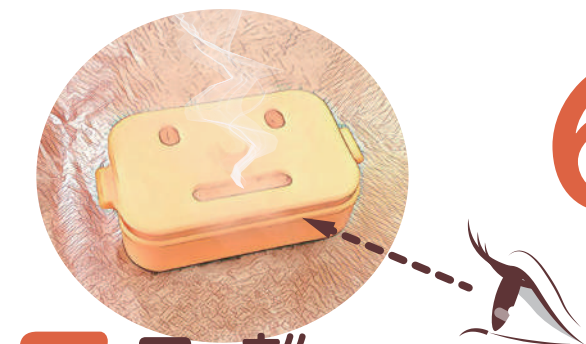

5 目を離さない

使用中は目を離さない。

6 手入れは水洗い

洗剤類は使用しない。



洗剤不可

7 精油は100%

アロマオイル(精油100%)を
使う場合は、水を注ぐ前に
発熱剤の上に3~5滴垂らす

※初めて使うアロマオイル(精油100%)は一度お試しいただき
問題がないことを確認してから、ご使用ください。
※水のみでもご使用いただけます。



安全上のご注意 ⚠ 警告

禁忌・禁止

- 禁忌症例:急性疾患、特に炎症性のもの、強度の身体衰弱、外傷、細菌性疾患、脳出血直後、急性脊髄炎、てんかん、感染症、高血圧、結核症の病気、心臓疾患及び医師から入浴や運動を禁止されている方への使用はおやめください。
- 目、粘膜部、感覚が損なわれている領域、糖尿病など血行障害により温度や痛みを感じにくくなっている人には使用しないでください。
- 発熱時、食後即時、飲酒前後、入浴の前後1時間は使用しないでください。
- 幼児や動物に使用しないでください。

使用上の注意

- 1回の治療は、20分を目安に使用してください。
- 熱さを強く感じるときは、すぐに取り除いてください。
- 水蒸気に火気を近づけないでください。
- 使用中は高温になりますので、施術中にフタを取り外さないでください。
- ほかの温熱治療器と併用しないでください。
- 不安定な部位・置き方はしないでください。使用中に転倒・落下や水漏れで火傷をするおそれがあります。
- 施術が終わるまでしっかりと安定した状態を保てるように設置してください。また、治療中はなるべく動かないようご指導ください。
- 肌に赤み、かゆみ、痛みなどの火傷の症状が出たときはすぐに使用を中止し、皮膚科専門医などに相談してください。
- 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例:発心、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある方、妊婦または妊婦の可能性のある方へは、使用前に医師、薬剤師へご相談ください。
- 使用中は、2人以上で行い、施術者は常に目を離さず監視を行ってください。異常が確認されたときは速やかにKii 温boxを取り外し、適切な処置を行ってください。
- 水道水以外のものを入れないでください。界面活性剤などが混入した場合は、泡状となり火傷を起こす可能性があります。

Kii caldo(発熱剤)
単回使用

お手入れ・処分方法・有効期間

- 直射日光を避け涼しい場所で保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は水道水で水洗いしてください。(発熱剤の酸化カルシウムにより、Kii 温box内側が白くなりますが無理に落とそうとせず、水道水で洗い流した後、自然乾燥してください。異物がある場合は乾いた布などで取り除いてください。)
- 洗剤を使用しないでください。
- 使用済みのKii caldo(発熱剤)は、市町村で定める区分に従って処分してください。
- Kii caldo(発熱剤)の使用期間は製造後5年です。有効期限は包装の裏側に記載しています。

ご購入ありがとうございます。

ご使用前に**必ず**本書をお読みにになり

正しくお使いください。

ご使用を誤ると**火傷やケガ**の原因になりますのでご注意ください。



保存版

販売元



株式会社 全医療器

TEL:092-565-1903 (代)

<https://www.zeniryoki.co.jp/>

福岡県福岡市南区鶴田3丁目16番地7号